

F833.N – Manuel d'utilisation (Version française)

Appareil de massage corporel à vibrations. Traduction française réalisée à partir du manuel fourni par l'utilisateur.

1. Présentation

Ce manuel décrit l'installation, l'utilisation, les consignes de sécurité et l'entretien de l'appareil BODY MASSAGER F833.N.

2. Consignes de sécurité

- Lire entièrement le manuel avant utilisation.
- Utiliser uniquement une alimentation 220-240 V / 50-60 Hz avec terre.
- Ne jamais utiliser de multiprise endommagée.
- Débrancher l'appareil avant tout déplacement ou remplacement du fusible.
- Installer sur une surface stable avec au moins 5 cm d'espace autour de l'appareil.
- Éviter l'humidité, l'eau, les vibrations importantes et le soleil direct.
- Ne jamais introduire d'objet dans l'appareil.

3. Caractéristiques techniques

Tension	220-240 V AC
Fréquence	50/60 Hz
Puissance	75 W
Dimensions	92 × 39 × 45 cm
Poids net	13,5 kg
Poids brut	16 kg

4. Contenu

Unité principale • Colonne • Tête colonne • Tête douche • Tête ronde en mousse • Tête demi-sphère • Éponge en U • Cordon d'alimentation

5. Mise en service

1. Brancher l'appareil.
2. Le voyant rouge s'allume.
3. Régler l'intensité progressivement avec le bouton ENERGY.
4. Régler la minuterie de 0 à 30 minutes puis commencer le traitement.

6. Recommandations

- Ne pas plier fortement le flexible (angle minimal conseillé : 100°).
- Une intensité plus élevée n'apporte pas forcément de meilleurs résultats.
- Associer l'utilisation à une alimentation équilibrée et une activité physique.

7. Contre-indications

Ne pas utiliser chez les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque ou d'implants électroniques, les personnes souffrant de maladies cardiaques graves, d'épilepsie, d'hypertension sévère, de lésions cutanées importantes, de thrombophlébite ou de troubles lymphatiques.

8. Entretien

Nettoyer l'extérieur avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse. Ne pas utiliser d'alcool ou de solvants. Ne pas démonter la tête vibrante. Faire contrôler l'appareil en cas de fumée, odeur anormale ou dysfonctionnement.

9. Dépannage

En cas de panne : arrêter immédiatement l'appareil, couper l'alimentation, débrancher la prise et contacter le distributeur ou le service technique.